

SCHEDA TECNICA THERMOGEL cod. KWK048

Definizione e codice

- Thermogel codice KWK048.

Caratteristiche generali

- Cuscino in gel riutilizzabile a rilascio graduale di caldo e freddo, in tessuto extra comfort e con fascia elastica per un utilizzo pratico e sicuro.
- Grazie al suo speciale tessuto può essere applicato direttamente sulla zona da trattare
- grazie alla fascia elastica consente un'applicazione stabile ed efficace in qualsiasi distretto corporeo



Indicazioni d'uso

- Consente di utilizzare il potere terapeutico del caldo e del freddo
- Conservare in freezer, per almeno due ore, per un utilizzo a freddo
- Riscaldare in acqua calda max 60°C. (per 10 minuti) o in forno a microonde max 300W (immergendolo completamente in un recipiente d'acqua per 6 minuti) per un utilizzo a caldo
- Solo per uso esterno

Dispositivo medico secondo direttiva 93/42 CEE

Modificata dalla direttiva 2007/47/CE

Attuazione con D.Lgs. n°37 del 25-01-2010

Classe I

- Uso: Dispositivo medico non invasivo a contatto con pelle integra.

Conformità

- DIRETTIVA CEE 93/42 modificata da DIRETTIVA 2007/47 /CE.
- Sistema Assicurazione qualità: certificato secondo EN ISO 9001
- Sistema Assicurazione qualità: certificato secondo EN ISO 13485

Specifiche tecniche

SPECIFICHE	MATERIE PRIME
COMPONENTI	
Gel	ACQUA DEMINERALIZZATA GLICERINA ISOCIDE F2 CARBOPOL ULTREZ 21 TRITANOLAMINA 99% BLU PATENT V (C.I. 42051)
Busta	Tessuto blu 100% microfibra in POLIESTERE
Fascia elastica	POLIAMMIDE/NYLON – POLIESTERE

Sterile	No
Presenza di lattice nel prodotto	No
Presenza di lattice nella confezione	No
Validità	5 anni
Modalità di conservazione	Conservare in un luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore

Smaltimento

- In accordo con la normativa vigente

Avvertenze d'uso

- Assicurarci che la pelle sia pulita e asciutta